


ネブライザーキットCの消毒に、家庭用電子レンジが活用できます！

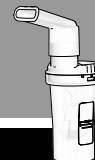

⚠ 守って頂きたい注意事項です



- オープン、トースター、グリル、オート機能で加熱しないでください。
- 電子レンジから取り出す場合は、**火傷をしないよう**十分に注意してください。
- 塩化ビニルチューブ（透明）は、電子レンジ消毒はできません。本器に付属のシリコンチューブ（不透明）は消毒可能です。
- ノーズピース（別売）は、電子レンジ消毒はできません。
- ネブライザーキットの洗浄時には小さな部品をなくさないように注意してください。
- ネブライザーキットの洗浄時にはタワシで洗浄しないでください。（キズが付く可能性があります。）
- 使用後は、汚れが固まらないうちに、直ちに洗浄してください。
- 水道水をご使用して消毒することも可能ですが、水道水中のカルキが付着することがありますので、精製水のご使用をお勧めします。
- 電子レンジ消毒は、本文記載の出力・加熱時間以外の設定では十分な消毒効果が得られませんので、ご注意ください。
また本文記載の設定以外で消毒された場合は、本器に破損、劣化等の生じる可能性があります。

1 使用したネブライザーキットを洗浄します



- ① 使用したネブライザーキットは、分解して洗浄してください。
汚れが落ちにくい場合には、中性洗剤を希釈して台所用スポンジで軽くなぞるように洗浄した後、ぬるま湯ですすぎ洗いをすると汚れが落ちやすくなります。
- ② チューブの内側は、水道水で流して洗浄してください。
- ③ 洗浄後は水切りかご、ざるなどで軽く水分を切ってください。


2 電子レンジ消毒の準備～実施

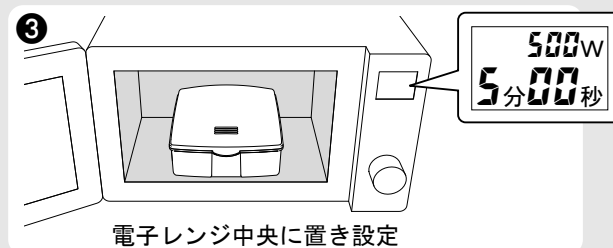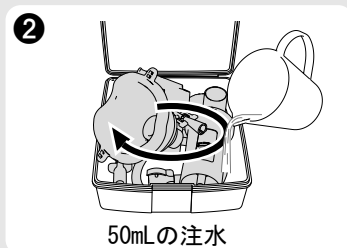

- ① 洗浄したネブライザーキットを専用収納ケースに入れてください。
- ② 精製水または水道水50mLをケース内に廻しながら、注いでください。蒸気による消毒です。必ず精製水または水道水を注いでください。
- ③ 専用収納ケースの蓋を開けて電子レンジの中央に置いてください。

電子レンジの設定は、出力500W～600W、加熱時間5分間が目安です。

3 電子レンジ消毒後のお取扱い

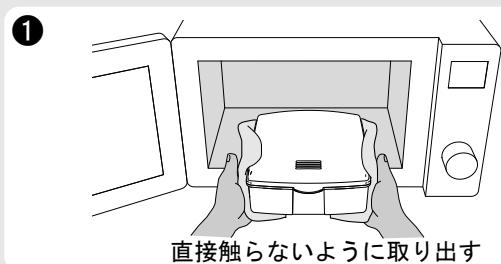

- ① 電子レンジから取り出すときは、必ず厚地のタオルや鍋つかみ（ミトン）などを用いてケースに直接触れないよう十分に注意してください。また、蒸気が顔や手にかからぬように厚地のタオルや鍋つかみ（ミトン）などで手を保護しながら、ケースの蓋を開けてください。
- ② そのまま、蓋を十分に開放して数分放置してください。放置後、ネブライザーキットを乾いた清潔な布巾等で軽く水気を拭き、ケース内の残留水分を捨て充分乾燥させた後、ケースにネブライザーキットを収納し、蓋を閉めて次の使用に備えて清潔に保管してください。